

NEOCLORIL

Ovuli vaginali

Composizione:

Un ovulo contiene: Acido Borico, Acido Jaluronico Sale Sodico, Policarbophil, Acido Lattico, Tocoferile Acetato, Vitamina A, Acido 18-beta-glicirretico, Tea Tree Oil, Trigliceridi Semisintetici, Fosfatidilcolina.

Descrizione:

Neocliril ovuli, a base di acido jaluronico, acido borico ed acido lattico, è un dispositivo medico che aiuta a mantenere intatte le difese naturali dell'ambiente vaginale, agevolando il ripristino della sua normale flora.

L'acido jaluronico, presente come sale sodico, ad un dosaggio di 10 mg/ovulo, svolge azione idratante e lubrificante contro la secchezza vaginale facilitando il ripristino di un naturale e gradevole ambiente vaginale.

L'acido lattico, componente normalmente presente in vagina, favorisce un'immediata correzione del PH e facilita il naturale ripristino del delicato ecosistema vulvo-vaginale.

L'acido borico, grazie alla sua notevole persistenza nell'ambiente vaginale, ne favorisce una riduzione del pH, creando condizioni inadatte alla crescita di microrganismi patogeni causa di infezioni genitali.

Indicazioni:

L'uso di Neocliril ovuli contribuisce ad eliminare i sintomi conseguenti a squilibri dell'idratazione e del pH vaginale, quali secchezza, irritazioni, prurito e bruciore, anche conseguenti a infiammazioni di natura micotica.

Posologia:

Introdurre in vagina 1 ovulo al dì, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 5-7 giorni successivi alla fine del ciclo mestruale o secondo altra indicazione medica.

Modalità d'uso:

- 1) Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna).
- 2) Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister un singolo ovulo.
- 3) Inserire l'ovulo delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali.

Conservazione:

Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 15° ed i 25° C, a riparo dalla luce e da fonti di calore.

Effetti collaterali:

Ipersensibilità accertata verso i componenti.

Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione è stata precedentemente aperta o danneggiata. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Precauzioni d'uso:

Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso degli ovuli deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Dispositivo monouso. Non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali.

Presentazione:

Confezione da 2 blister contenente 10 ovuli vaginali da 2 g\ovulo.

**Fabbricante:**

Gruppo Farmaimpresa srl - Via Cipro, 1 - 25124 Brescia Italy

Distributore:

Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.



FT/CE/48.7/F00 - 05/03/2020